



MOEM es una silla de ducha y aseo para facilitar la higiene de personas con discapacidad de movimiento. Está destinada para el uso en ducha, lavabo y sobre inodoro, así como para transportar a pacientes en trayectos cortos y en espacios interiores, tanto en entornos domésticos como en centros sanitarios.

Puede usarse en zonas de aseo pero no en entornos corrosivos como piscinas o similares.

No puede usarse como método de sujeción en interior de vehículos ni otros medios de transporte.

Está prevista para personas adultas (generalmente con una altura mínima de 146 cm y un peso mínimo de 40 kg) y con piel intacta. El **peso máximo del usuario** es de **150 kg**.

La silla de baño MOEM está considerada producto sanitario de clase 1 según el Reglamento Europeo 2017/745 de Productos Sanitarios (MDR).

Por ello está destinada a ser utilizada en seres humanos con fines de tratamiento o alivio de una enfermedad, así como al tratamiento, alivio o compensación de una lesión o una deficiencia.


Cumple con la Norma:

* **ISO 17966** "Productos de ayuda que soportan usuarios para la higiene personal: requisitos y métodos de ensayo."

TECNIMOEM CARE, S.L. defiende una política permanente de mejora de sus productos. Por esta razón, las características de los aparatos pueden ser modificadas sin previo aviso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CARGA MÁXIMA	150 KG
PESO de la silla	15 KG
RUEDAS	Ø125 mm con freno independiente
BASTIDOR EXTERIOR, recubierto epoxi-poliéster (Según norma UNE 10305-5)	Tubo acero Ø25x1,5mm Pletina acero 30x5mm
Altura suelo-asiento	515 mm
Espacio libre bajo inodoro	470 mm
Espacio libre entre reposabrazos	425 mm
Medidas exteriores:	
reposapiés desplegado – silla en movimiento	largo 905, ancho 530, altura 1085 mm
reposapiés recogido – silla en movimiento	largo 649, ancho 530, altura 1085 mm
reposapiés recogido – silla reposo/almacenaje	largo 615, ancho 530, altura 1085 mm
Diámetro de giro	1000 mm
Anchura pivote	1000 mm
REPOSABRAZOS	Extraíble
REPOSAPIÉS	Extraíble y regulable en 5 posiciones
TAPA ASIENTO	Extraíble y abatible
Tornillería	Acero inoxidable
Respaldo, reposabrazos, asiento, reposapiés, tapa asiento, orinal, en polipropileno	
Asidero y soportes ruedas en polipropileno y fibra de vidrio	
La silla no es plegable. Ninguna pieza desmontable pesa más de 10 kg.	
La silla no perturba el funcionamiento de otros dispositivos cercanos que emitan campos electromagnéticos	

MEDIDAS EN MM

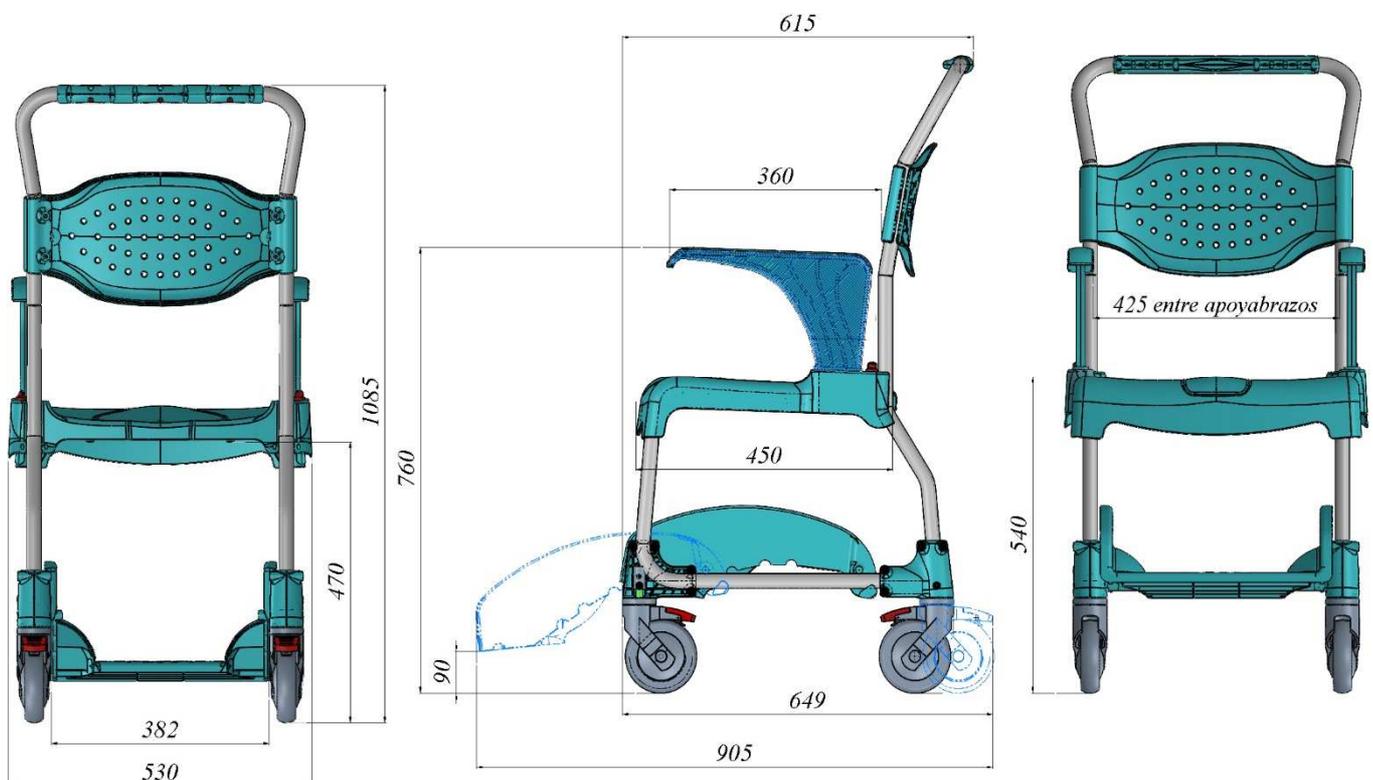

GARANTIA Y VIDA ÚTIL

Nuestros productos están **garantizados por un periodo de 3 años** contra todo defecto de fabricación. En caso de que el usuario/cuidador/comprador permita efectuar intervenciones o personalizaciones por parte de personal no autorizado o no seguir las recomendaciones de limpieza y mantenimiento expirarán todos los derechos de garantía y responsabilidad.

La silla es reutilizable. No tiene una **vida útil** determinada ya que influyen variables como el mayor o menor uso, o la forma adecuada/inadecuada de uso. No obstante, se estima que la vida útil de la silla es de **5 años**, siempre y cuando se utilice diariamente y de conformidad con las instrucciones de seguridad, limpieza, almacenamiento y mantenimiento establecidas en el manual de uso.

Tecnimoem dispone de una red de distribuidores para la comercialización de todos sus productos. Ante cualquier problema o duda de **servicio técnico**, el usuario final debe ponerse en contacto con el DISTRIBUIDOR donde ha adquirido el producto. El distribuidor dispondrá de formación y recambios suficientes facilitados por Tecnimoem para realizar el **mantenimiento** de los productos.

ACCESORIOS**ASIENTO SILLA MOEM**

Asiento de poliuretano de dos componentes (poliol e isocianato), sin CFCs ni HCFCs. Recubierto en color azul. Se ajusta al asiento fijo de la silla. Disponible en dos modelos.

**ASIENTO ABIERTO**

Peso 900 gr.

Medidas aprox. 50x52x12cm.

**ASIENTO CERRADO**

Peso 940 gr.

Medidas aprox. 50x52x12cm.

CINTURÓN SILLA MOEM

Cinturón abdominal para sujetar al usuario a la silla



Tejido en malla de poliéster 100% . Ribete de acrílico de 3cm (azul). Cintas de sujeción en poliéster. Se ajusta al respaldo de la silla.

Banda de 45 x 11.5cm aprox.

Contorno cinta 110cm aprox.

Peso 100 gr.



LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Limpieza

La silla ha sido diseñada para una limpieza fácil y una desinfección óptima.

- Mantener las ruedas y frenos libres de suciedad o restos de jabón.
- Limpiar periódicamente con productos no abrasivos (ph entre 5 y 9).
- No utilizar agua a una temperatura superior a 85° C.
- Usar una solución desinfectante de alcohol diluido al 70%.
- Aclarar y secar después de cada uso.

Mantenimiento

ANTES DE CUALQUIER USO DE LA SILLA, además de las medidas de limpieza descritas anteriormente, se deben sustituir aquellas partes de la silla en las que se aprecien defectos. Para ello contactar con el distribuidor de la silla para que facilite los repuestos necesarios.

Las operaciones de mantenimiento sólo pueden ser realizadas por personal técnico cualificado y autorizado. Antes de realizar cualquier intervención de reparación, mantenimiento, limpieza o desinfectado consultar al fabricante o en www.tecnimoem.com para las instrucciones de cambio de componentes.

TECNIMOEM recomienda realizar una **revisión periódica** de la silla y de sus accesorios a fin de mantenerlos en buen estado de funcionamiento. Los siguientes puntos merecen una atención especial:

- Los soportes plásticos de las ruedas
- Las ruedas y sus frenos
- El bastidor metálico (ausencia de óxido)
- Otras piezas plásticas
- La tornillería (correctamente apretada).

La frecuencia de las revisiones técnicas debe adaptarse al estado de la silla y a las condiciones particulares de utilización, dado que es posible que se deban cambiar periódicamente algunos componentes.

LISTA DE RECAMBIOS	Frecuencia
SOPORTES RUEDAS	Cada 3 años
REPOSABRAZOS SILLA BAÑO	Cada 3 años
CONJ RUEDA+EJE INOX SILLA MOEM	Cada 3 años
CINTURÓN SEGURIDAD SILLA MOEM	Cada 3 años
CONJ. RESPALDO+BRIDAS SILLA MOEM+TORNILLERÍA	Cada 5 años
CONJ. ASIENTO+BRIDAS SILLA MOEM+TORNILLERÍA	Cada 5 años
CONJ. CIERRE+PLETINA BRAZO SILLA MOEM+TORNILLERÍA	Cada 5 años
CONJ. ORINAL+GUIAS SILLA MOEM+TORNILLERÍA	Cada 5 años
MANGO SILLA BAÑO+TORNILLERÍA	Cada 5 años
TAPA ASIENTO SILLA BAÑO	Cada 5 años
REPOSAPIES SILLA BAÑO	Cada 5 años
ASIENTO ABIERTO SILLA MOEM	Cada 5 años
ASIENTO CERRADO SILLA MOEM	Cada 5 años

Transporte y almacenamiento

Se deben adoptar todas las precauciones necesarias para garantizar un transporte seguro de la silla y de sus accesorios, evitando golpes y suciedad.

Durante el traslado y/o almacenamiento prolongado de la silla, ésta debe estar con el reposapiés recogido, ruedas frenadas, asegurada con correas, protegida contra el ingreso de agua o humedad (< 75%) y a una temperatura entre -20°C y +50°C.

Si la silla queda almacenada durante mucho tiempo (más de 4 meses), debe revisarse el funcionamiento por persona cualificada antes de su uso.

Tecnimoem** Care** desarrolla, fabrica y distribuye camas, somieres, grúas, sillas y complementos para uso geriátrico y doméstico.

En un mundo donde la calidad de vida llegando a la edad madura es el bien más valorado, **Tecni**moem** Care** pone todo su esfuerzo en la investigación continua y en el desarrollo de elementos para el descanso que precisan las personas que por problemas físicos, de edad o simplemente que valoran la ergonomía y la adaptabilidad, eligen nuestros productos.

Tecnimoem** Care**, en su esfuerzo de innovación, incorpora los mejores materiales del mercado con acabados perfectos que superan todas las normas de calidad y son los que nos diferencian y nos hacen ser elegidos por nuestros clientes.

SNR: ES-MF-000019199
Según (EU) 2017/745 MDR



TECNIMOEM CARE S.L.

CTRA. Logroño-Mendavia Km.5
31230 VIANA (Navarra) – ESPAÑA
[tecni**moem**@tecni**moem**.com](mailto:tecnimoem@tecnimoem.com)

Telf. +34 948 64 62 13
Fax. +34 948 64 63 80
[www.tecni**moem**.com](http://www.tecnimoem.com)