

FICHA TÉCNICA - Arnés Standar



Diseñado para realizar las transferencias con seguridad y comodidad tanto para el paciente como para el personal asistencial.

El arnés TECNIMOEM CARE, S.L. junto con la grúa POWERLIFT está diseñado y fabricado según la normativa UNE-EN ISO 10535:2007 Grúas para el traslado de personas con discapacidad. Requisitos y métodos de ensayo

**Por motivos de mejora de nuestros productos, Tecniemoem Care se reserva el derecho de cambiar especificaciones técnicas y/o imágenes de nuestros productos sin previo aviso.*

CARACTERÍSTICAS

Arnés dorsolumbar para grúa de transferencia. Carga máxima 200Kg.

Confeccionado con tratamiento **Thermy-tex** superabsorbente que anula eficazmente la reproducción de bacterias y la formación de olores. Transpirable, ultraligero, de secado rápido y alta resistencia a la tracción. Poliéster 100%.

Regulación en tres alturas (rojo, verde y amarillo) con anclaje de seguridad.

Compuesto de diferentes capas de espesor y materiales:

- 0.5mm tejido CANTÁBRICO (100% poliéster texturizado de color oscuro en contacto con el paciente)
- 4.5mm de tejido esponja BED (100% poliéster en interior)
- 0.75mm de tejido ONDURA LÁSER (67% de poliamida, 32% de poliéster y 1% de poliuretano en capa externa del arnés)
- Cintas de poliéster de ancho 4cm (azul, rojo, verde y amarillo) y ribete de acrílico de 3cm (azul).

FUNCIONES Y MODO DE EMPLEO

Diseñado para realizar las transferencias con seguridad y comodidad tanto para el paciente como para el personal asistencial.

El arnés es adecuado para personas con movilidad de la cabeza.

Puede usarse sentado y acostado. Puede usarse con las piernas juntas o separadas dependiendo del grado de movilidad del paciente.

SEGURIDAD

No utilizar nunca con cargas superiores a la carga máxima de la grúa (marcada sobre la misma) o del arnés (200kg.).

Compruebe que el arnés se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo con pacientes.

Se recomienda usarlo previamente en personas sanas para familiarizarse con él.

No utilizar el arnés si presenta signos de rasgado, desgaste o deformación.

No usar el anclaje final de seguridad de color azul.


LAVADO Y SECADO

Lavado recomendado a 30º con jabón neutro. No usar lejía ni lavar en seco. No admite planchado. Secado sobre superficie plana. No exponer al sol o fuente de calor. No admite secadora.



Asegúrese de que el arnés tiene el tamaño y características adecuados al paciente

Medidas aproximadas (en mm.). Disponible en 2 tallas, M y L

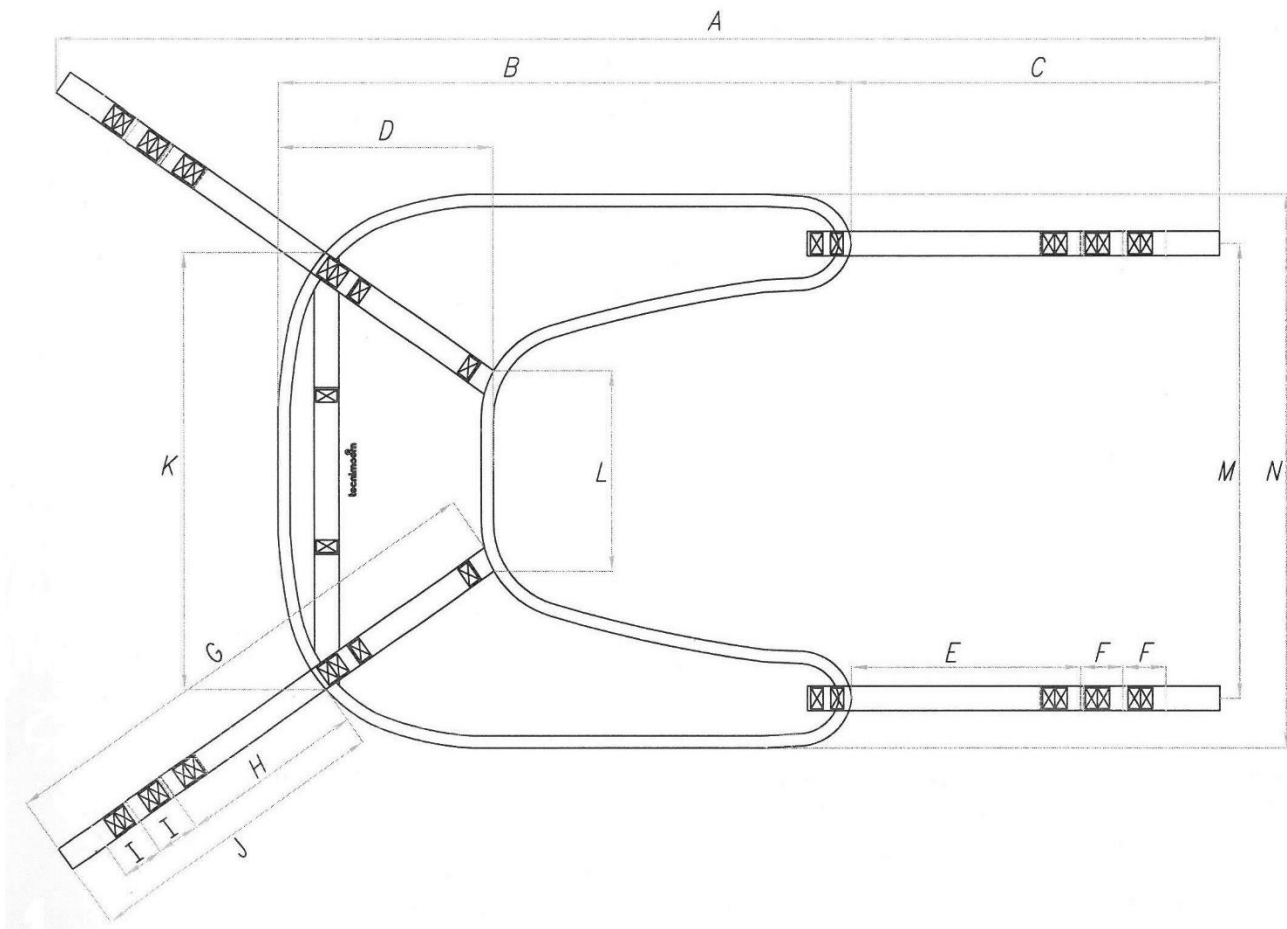

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Talla M	189	93	60	35	37	7	85	28	7	51	71	32	74	90
Talla L	199	104	60	39	37	7	89	28	7	51	79	36	83	100

Tecnimoem** Care** desarrolla, fabrica y distribuye camas, somieres, grúas y complementos para uso geriátrico y doméstico.

En un mundo donde la calidad de vida llegando a la edad madura es el bien más valorado, **Tecni**moem** Care** pone todo su esfuerzo en la investigación continua y en el desarrollo de elementos para el descanso que precisan las personas que, por problemas físicos, de edad, o simplemente que valoran la ergonomía y la adaptabilidad, eligen nuestros productos.

Tecnimoem** Care**, en su esfuerzo de innovación, incorpora los mejores materiales del mercado con acabados perfectos que superan todas las normas de calidad y son los que nos diferencian y nos hacen ser elegidos por nuestros clientes.

SNR: ES-MF-000019199
Según (EU) 2017/745 MDR



TECNIMOEM CARE S.L.

CTRA. Logroño-Mendavia Km.5
31230 VIANA (Navarra) – ESPAÑA
[tecni**moem**@tecni**moem**.com](mailto:tecnimoem@tecnimoem.com)

Telf. +34 948 64 62 13
Fax. +34 948 64 63 80
[www.tecni**moem**.com](http://www.tecnimoem.com)